

Wissensquiz zum LiquoGuard 7



Good to know!

LiquoGuard® wird traditionell zur Kontrolle und Einstellung des Liquordruckes, zur kontinuierlichen und geregelten Drainage eingesetzt.

Typische Anwendungsfälle sind:

- Ventrikuläre Drainage
- Lumbale Drainage
- Druckgesteuerte Drainage
- Volumengesteuerte Drainage



Um mehr zur Anwendung des LiquoGuard 7 zu erfahren, scanne den QR Code mit dem Handy und schau dir das Video auf YouTube an.

① Die Drainage des Liquors mit dem LiquoGuard 7 wird über... beeinflusst und gesteuert!

- ☐ die verordnete Volumenmenge ...
- ☐ den Intrakraniellen Druck...
- ☐ den verordneten Liquordruck...



Reflektiere dich! Weisst du was sich hinter folgenden Begriffen verbirgt?

Pcsf?

PSet?

VSet?

② Vervollständige nachstehenden Text!

Der LiquoGuard 7 drainiert den sofern der intrakranielle Druck (Pcsf)

ist als der verordnete Zielliquordruck (). Es wird nicht mehr Liquor

drainiert als verordnet von der VSet.

Mit der Taste kommst du zurück ins Hauptmenü. Am Ende der Schicht

kannst du die nach betätigen der und

Taste ablesen. Die bisherigen Alarme können unter der Taste

abgelesen werden. Am Ende der Bedienung vergiss nicht die

zu aktivieren!

③ Und zum Abschluss noch eine kleine Recherche.

- Suche die Richtlinie zum LiquoGuard im Intranet!
- Suche die Liste der Superuser im Intranet!